


Ultra Ear™ BTE

Appareil de correction auditive

Guide d'utilisation

Insertion de la pile :


Insertion de la pile : ouvrez le couvercle du logement de pile à l'aide du bout d'un doigt et insérez la pile comme sur l'illustration (utilisez une pile zinc-air 1,5 V LR-44 ou 675). La pile doit être insérée en respectant les polarités. La durée de vie d'une pile est d'environ 120 à 180 heures.

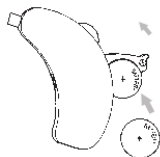

Instructions de pose :

1. Placez l'Ultra Ear derrière l'une ou l'autre oreille.
2. Tournez l'embout pour le mettre dans la bonne position selon l'oreille droite ou gauche.
3. Insérez l'embout dans l'oreille. L'embout doit être inséré profondément dans l'oreille.
4. Si le tube semble trop long, il peut être coupé pour plus de confort.



L'Ultra Ear contient trois embouts de taille différente pour votre confort.

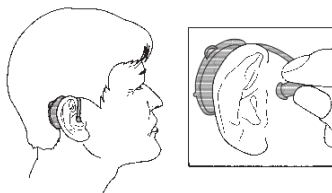

Instructions d'utilisation :


1. Vérifiez que la pile soit dans son logement.
2. Tournez le réglage de volume sur le niveau le plus faible.
3. Placez l'embout auditif dans votre oreille droite ou gauche.
4. Tournez l'interrupteur sur ON (MARCHÉ). Augmentez le volume sonore au niveau le mieux adapté.

(Ne couvrez pas l'appareil avec la main pour éviter qu'un bruit strident ne se fasse entendre.)

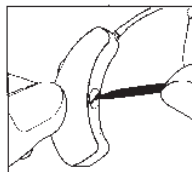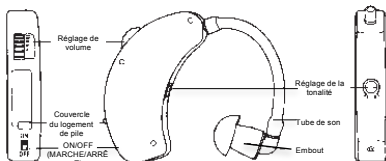

Réglage de la tonalité :

Utilisez l'extrémité du bâtonnet en plastique pour tourner le bouton de réglage de tonalité et le régler sur « L » (Faible) ou « H » (Fort)

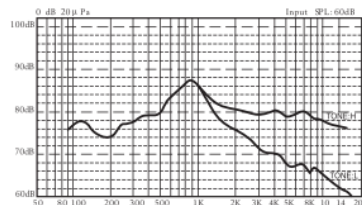

Entretien de l'appareil à l'aide d'accessoires :


Utilisez la pièce en plastique et son extrémité en acier pour pénétrer dans l'embout et retirer le cérumen. Utilisez la brosse souple pour brosser doucement l'embout et retirer toute trace de saleté ou de cérumen.

Interrupteur ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) :

L'interrupteur doit être tourné sur la position OFF (ARRÊT) quand l'appareil n'est pas utilisé. Ceci prolongera la durée de vie de la pile.

MISE EN GARDE :

1. Ce produit n'est pas étanche et, par conséquent, son utilisateur doit veiller à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Si de l'eau venait à pénétrer dans l'Ultra Ear, retirez la pile et placez l'appareil dans un endroit suffisamment chaud et sec.
2. Il importe d'augmenter très progressivement le volume sonore pour éviter des hausses subites du son.
3. Ce produit n'est pas un appareil médical.

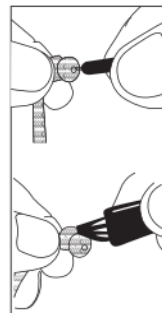

DURÉE DE VIE DE LA PILE

DE 120 À 180 HEURES
D'UTILISATION (LR-44)

COURANT DE FONCTIONNEMENT

de 0,8 à 2,5 mA

PLAGE DE TENSION DE FONCTIONNEMENT

de 1,0 à 1,8 V

CONSOMMATION

3 mW

RAPPORT SIGNAL-BRUIT

> 35 dB

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

de 100 à 15 K +/- 6 dB

SENSIBILITÉ

-8 dB

POIDS (PILE COMPRISE)

8,5 g

Importé par :
GSM-WALKER Products, LLC

P.O. Box 535189

Grand Prairie, TX 75053

www.walkersgameear.com

Appel sans frais : 877-269-849

FABRIQUÉ EN CHIN