




WALKER'S

AMPLIFICATEUR SONORE

ULTRA EAR™ ITC

AMPLIFICATEUR D'ÉCOUTE

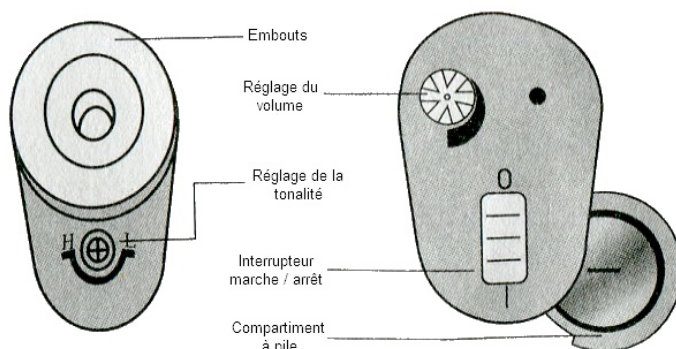

- Installation de la pile :

Ouvrir le compartiment à pile du bout du doigt et y insérer la pile comme indiqué ci-contre (type de pile : A312 Zinc-Air Battery).

Oter la languette se trouvant sur la pile avant utilisation.

Veiller à positionner la pile dans le bon sens.



- Embouts :

Trois différents diamètres sont à votre disposition pour un confort maximal.

- Interrupteur ON/OFF :

La position de l'interrupteur est indiquée ci-contre

L'interrupteur doit être positionné sur « 0 » lorsque l'amplificateur n'est pas utilisé. Cela permettra une plus longue utilisation de la pile.



- Molette de réglage du volume :

Volume du plus bas au plus élevé.



Veiller à ce que les embouts sélectionnés soient bien mis sur l'amplificateur.

Vérifier que la pile est en place.

Tourner la molette de réglage du volume au minimum.

Positionner l'interrupteur sur « 0 ».

Mettre le produit dans l'oreille droite ou gauche.

Augmenter **progressivement** le volume au niveau désiré, vous éviterez ainsi un brusque accroissement du son.


Après utilisation, positionnez l'interrupteur sur « 1 ».

ATTENTION :

Les différentes pièces de ce produit ne sont pas imperméables, assurez-vous donc d'empêcher l'eau de s'y infiltrer.

En cas d'infiltration, retirer la pile et placer l'amplificateur sur un endroit chaud pour le sécher.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation médicale.

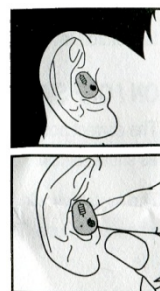

GSM-Walker Products, LLC

PO Box 535189 • Grand Prairie, TX 75053-5189

Toll-free customer support **800-424-1069**

